
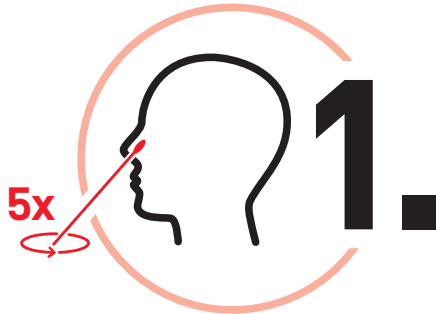


6 Schritte-Anleitung zum Antigen-Selbsttest

VIVADIAG PRO

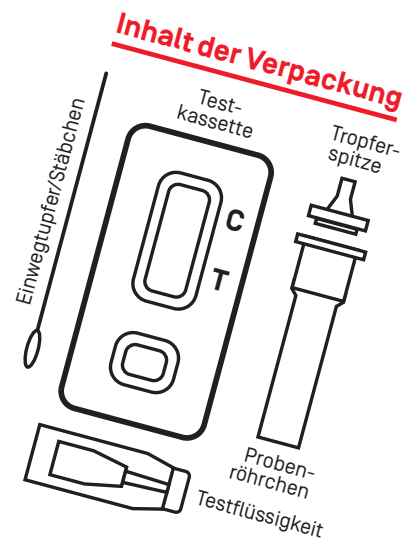


1. Tupfer **ca. 2,5 cm** in ein Nasenloch einführen
Das Stäbchen **5 Mal drehen**, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

Die versiegelte Kapsel senkrecht halten und die Testflüssigkeit in den unteren Bereich fließen lassen


Die Spitze abbrechen und die Lösung in das Probenröhrchen füllen

Das Stäbchen einführen und Tupfer **5 Mal drehen**

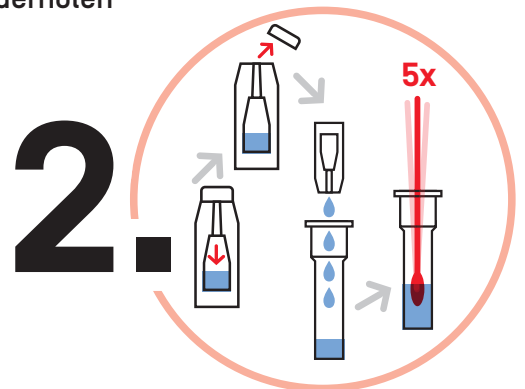

2. Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken

Tropferspitze aufsetzen

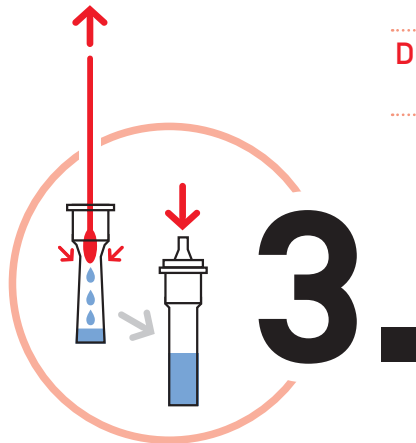


3.

Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen

3 Tropfen aus dem Röhrchen auf die Testkassette tropfen

Wichtig: Die Testkassette reagiert nach dem Auftropfen der Testflüssigkeit sensibel auf Bewegung. Um das Testergebnis nicht zu verfälschen, darf sie daher nicht gedreht, geschüttelt oder bspw. von einem Raum in den anderen getragen werden.

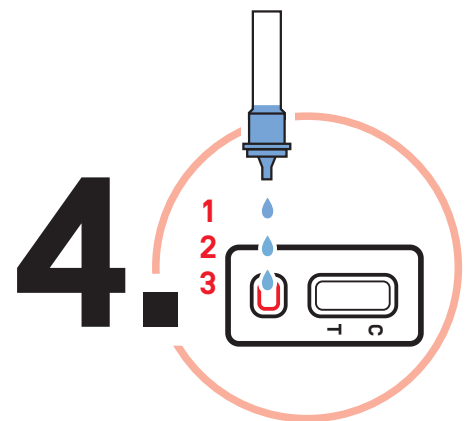


4.

5. **15 Minuten** warten

Das Ergebnis ablesen



Ergebnisinterpretation

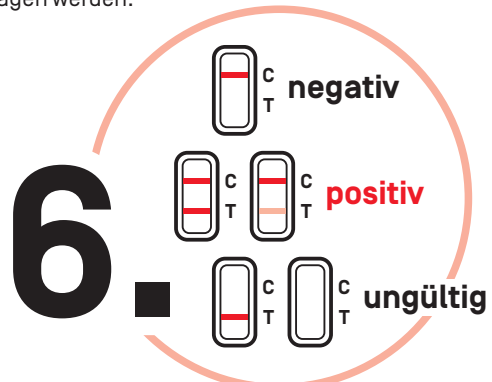

6.

POSITIV? → 1450 anrufen!

NEGATIV? Weiterhin gesund bleiben!

Disclaimer: Diese Anleitung dient einer übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellung der Testabläufe bei einer Eigenanwendung von anterio-nasalen COVID-19-Antigen-Schnelltests. Bitte beachten Sie, dass die Durchführung von COVID-19-Antigen-Schnelltests immer entsprechend der Gebrauchsinformation des jeweiligen Herstellers oder Inverkehrbringers zu erfolgen hat. Lesen Sie daher bitte vor Verwendung eines COVID-19-Antigen-Schnelltests die beiliegende Gebrauchsinformation genau durch und befolgen Sie die darin vorgegebene Anleitung! Die Österreichische Apothekerkammer übernimmt keine Haftung für Schäden jedweder Art, die durch die Verwendung der Inhalte dieser Anleitung entstehen können.

